



chaps classic natur

Der Klassiker unter den Kondomen:
Transparente Kondome mit Feuchtfilm.
natürlich & gefühlsecht!

chaps feeling

Das unvergleichlich zarte Kondom:
Pinkfarbene Kondome mit Feuchtfilm.
hauchzart & sexy pink!

chaps fruit & fun

Der Mix aus farbigen Kondomen mit
fruchtigen Aromen.
farbig & frisch fruchtig!

chaps Gel

Gleitgel für mehr
Abwechslung & Spaß!



Kondome + Gleitgel

Enjoy life!



chaps (sprich „tschäps“, engl. *umgangs-spr. für „Jungs“ oder „Burschen“*) sind wirklich tolle „Jungs“, denn sie sind zuverlässig und geben Dir optimale Sicherheit. Im entscheidenden Moment lassen sie Dich nicht im Stich. Außerdem sind diese echten Typen superverträglich. Mit solchen „chaps“ lässt sich's leben. Genieße das Leben und die Liebe – Enjoy life!

chaps Kondome werden aus dem natürlichen Rohstoff des Gummibaums (Naturkautschuklatex) hergestellt und ermöglichen so ein intensives und echtes Gefühls-erlebnis. chaps Kondome sind für die Anwendung beim vaginalen Geschlechtsverkehr bestimmte Medizinprodukte zur Empfängnisverhütung und zum lokalen Infektionsschutz. Bei nicht vaginaler Anwendung ist das Risiko des Abbruchs oder der Beschädigung höher. Keine Verhütungsmethode kann einen 100%igen Schutz vor Schwangerschaft und Infektionen garantieren.

chaps Kondome unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Jedes Kondom wird einzeln elektronisch geprüft und bietet bei richtiger Anwendung optimale Sicherheit und Verträglichkeit.

Mit Silikon-Gleitfilm.

- Maße (ohne Dehnung):
- Breite: 52 mm
 - Umfang: 104 mm
 - Durchmesser: 33 mm
 - Länge: mind. 170 mm

Geprüft nach EN ISO 4074





Kondome

Enjoy life!

Gebrauchshinweise für die richtige Anwendung:



Siegelbriefchen behutsam an der Zackenkante aufreißen.

Bitte beachten: Fingernägel, Schmuck oder Piercings im Intimbereich

können das Kondom beschädigen. Sollte das Siegelbriefchen beschädigt sein, das Kondom entsorgen und ein neues verwenden.



Vor der ersten Berührung von Penis und dem Körper des Partners das Kondom über den steifen Penis wie folgt abrollen:

Vorhaut ganz zurückziehen, Reservoir mit Daumen und Zeigefinger sanft zusammendrücken, mit Abrollrand nach außen auf die Eichel setzen und das Kondom vollständig abrollen.



Sobald der Penis zu erschlaffen beginnt, das Kondom rutscht oder sehr spannt (Gefahr des Berstens), den Penis herausziehen. **Dabei**

das Kondom am Penisansatz festhalten, damit es nicht abrutscht. Jedes Kondom nur einmal benutzen, da bei Wiederverwendung ein erhöhtes Risiko einer Beschädigung bzw. Infektion zu befürchten ist.

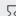
Sollte das Kondom nach Verwendung ein Loch aufweisen oder gerissen sein, sobald wie möglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt aufsuchen.

Wichtige Hinweise: Diese Kondome sind aus **Naturkautschuklatex** und dürfen von Latex-Allergikern nicht benutzt werden. Keine Verhütungsmethode kann einen 100%igen Schutz garantieren.

Mangelnde Gleitfähigkeit, die die Sicherheit von Kondomen gefährden kann, sollte durch den Auftrag einer ausreichenden Menge von chaps Gleitgel auf die Außenseite des Kondoms behoben werden.

Bei Anwendung zusammen mit Kondomen darf das Gleitgel nicht direkt auf den Penis oder die Innenseite des Kondoms aufgetragen werden, da sich hierdurch das Risiko erhöht, dass das Kondom abrutscht oder reißt.

Nie öl- oder fetthaltige Gleitmittel (z. B. Vaseline, Babyöl, Körperlotion) verwenden, sondern nur solche, die vom Hersteller für die Anwendung mit Latex-Kondomen empfohlen sind. Bei Anwendung von Arzneimitteln wie **Zäpfchen, Salben, Cremes** etc. an Vagina oder Penis frage Deinen Arzt oder Apotheker, ob diese die Sicherheit des Kondoms beeinträchtigen können.

Siegelbriefchen in geschlossener Schachtel kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt **aufbewahren**. Das **Haltbarkeitsdatum** beachten  **Entsorgen benutzter Kondome** nur über den **Hausmüll**, nicht in die Toilette werfen.

Wenn eine **ungewollte Schwangerschaft oder Infektion** zu befürchten ist, **oder wenn bei der Kondombenutzung Unverträglichkeiten** auftreten, frage Deinen Arzt oder informiere Dich bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (www.liebesleben.de).

Hinweis-Symbole auf der Verpackung:



Für die sichere Anwendung bitte Beipackzettel beachten.



Jedes Kondom nur einmal benutzen, da bei Wiederverwendung ein erhöhtes Risiko einer Beschädigung bzw. Infektion zu befürchten ist.



Nicht benutzen, wenn das Siegelbriefchen beschädigt ist. Kondom entsorgen und ein neues verwenden.



Kondome vor direktem Sonnenlicht und Hitze geschützt lagern.



Kondome trocken lagern.



Verfalldatum. Kondome nicht benutzen, wenn Verfalldatum überschritten.



Diese Kondome sind aus Naturkautschuklatex, der bei Latex-Allergikern allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen kann. Latex-Allergiker dürfen diese Kondome deshalb nicht benutzen.



Nummer der Kondomcharge.



Hersteller.